




SHAPED FOR YOU

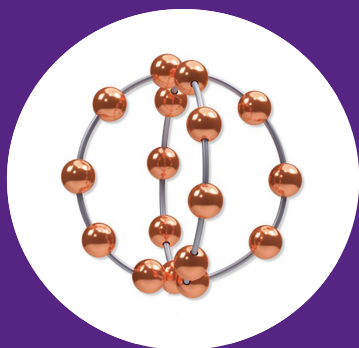

DE NIEUWE GENERATIE  
HORMOONVRIJE ANTICONCEPTIE

## NIEUWE GENERATIE ANTICONCEPTIE

De Ballerine is een nieuw, betrouwbaar spiraaltje zonder hormonen. Het werkt op een vergelijkbare wijze als andere koper-spiralen en is effectief voor 5 jaar. Ballerine is ideaal voor vrouwen die een voorkeur hebben voor hormoonvrije anticonceptie. De natuurlijke cyclus blijft behouden en je kunt zorgeloos vrijen.




Het spiraaltje is geschikt voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De Ballerine is door de zeer dunne inbrenghuls makkelijk te plaatsen en daardoor ook geschikt voor jonge vrouwen die nog niet eerder bevallen zijn. Door de unieke en soepele 3D-vorm kan de Ballerine een mooi alternatief zijn voor vrouwen die minder goed reageren op andere koperspiralen.



— Ballerine  
ware grootte  
(Ø15 mm)

## WERKING EN PLAATSING

De Ballerine bestaat uit een aantal koperen balletjes, geregen aan een flexibel frame met 'memory shape'. De balletjes hebben een koperoppervlak van 300mm<sup>2</sup>. Zodra het frame uit de inbrenghuls komt, krult het zich in de baarmoeder op tot een bolle vorm. Door deze vorm vindt de Ballerine constant haar ideale positie in de baarmoeder. Omdat de inbrenghuls van Ballerine dunner is dan die van andere spiraaltjes, kan dit het plaatsen vergemakkelijken.

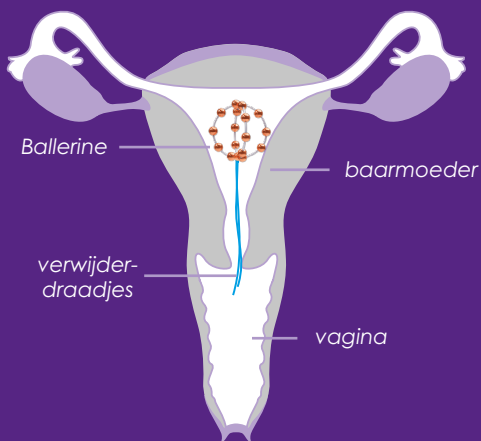

Direct na plaatsing geven de koperen balletjes van de Ballerine geleidelijk een beetje koper af. Dit zorgt ervoor dat:

- spermacellen verlamd worden
- bevruchting van een eicel voorkomen wordt
- het innestelen van een eicel in de baarmoeder voorkomen wordt

Ballerine werkt op een vergelijkbare wijze als andere koperspiralen en zorgt voor betrouwbare anticonceptie voor 5 jaar.

## BIJWERKINGEN

In de eerste drie maanden na plaatsing van Ballerine kunnen vrouwen last krijgen van bijwerkingen. De meeste vrouwen hebben weinig tot geen last van het spiraaltje, maar bij anderen is er wel sprake van bijwerkingen, zoals:

- hevige, langdurige en/of onregelmatige menstruatie
- (soms hevige) buikkrampen
- tussentijds bloedverlies

Na deze drie maanden is je lichaam gewend aan het spiraaltje en herstelt de natuurlijke cyclus zich.

Je mag Ballerine niet gebruiken bij\*:

- onverklaarbaar vaginaal bloedverlies
- een actieve ontsteking in het kleine bekken
- een afwijking van de baarmoeder
- de ziekte van Wilson
- een koperallergie

Ballerine is minder geschikt voor vrouwen die van nature hevig menstrueren en hier last van ondervinden.

\* Deze folder is een aanvulling op de patiëntenbijsluiter. Lees altijd eerst de bijsluiter voordat je Ballerine laat plaatsen.



## VERGOEDING & KOSTEN

Anticonceptie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering aan vrouwen vanaf 21 jaar, tenzij zij hiervoor aanvullend verzekerd zijn. De plaatsing van het spiraaltje door de huisarts wordt wél vergoed. Vraag na bij de zorgverzekeraar wat er vergoed wordt als het spiraaltje geplaatst wordt door een gynaecoloog of verloskundige. Houd rekening met het eigen risico.

Ballerine is verkrijgbaar bij de apotheek en kan ook online besteld worden via [www.ballerine.nl](http://www.ballerine.nl). De aanschafprijs is €119.





Titus Health Care BV  
info@titushealthcare.nl  
www.titushealthcare.nl  
06-18284427

WWW.BALLERINE.NL

**3D**

Innovatief design  
3D bolvormig IUD



Hormoonvrij

**3,2  
mm**

Dunne inbrenghuls: 3,2 mm

**99%**

Betrouwbaarheid: 99%

**5  
jaar**

Verblijfsduur van 5 jaar