




SHAPED FOR YOU

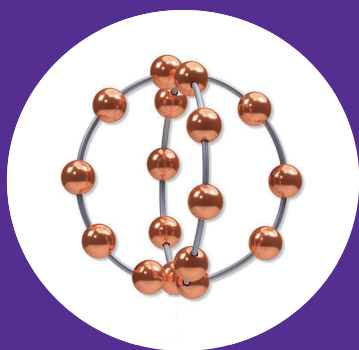

DE NIEUWE GENERATIE
HORMOONVRIJE ANTICONCEPTIE

NIEUWE GENERATIE ANTICONCEPTIE

De Ballerine is een nieuw, betrouwbaar spiraaltje zonder hormonen. Het werkt op een vergelijkbare wijze als andere koperspiralen en is effectief gedurende 5 jaar. De Ballerine is ideaal voor vrouwen die een voorkeur hebben voor hormoonvrije anticonceptie. De natuurlijke cyclus blijft behouden en je kunt zorgeloos vrijen.




Het spiraaltje is geschikt voor vrouwen tussen 16 en 45 jaar. De Ballerine is door de zeer dunne inbrenghuls makkelijk te plaatsen en daardoor ook geschikt voor jonge vrouwen die nog niet eerder bevallen zijn. Door de unieke en soepele 3D-vorm kan de Ballerine een mooi alternatief zijn voor vrouwen die minder goed reageren op andere koperspiralen.



— Ballerine
ware grootte
(Ø15 mm)

WERKING EN PLAATSING

De Ballerine bestaat uit een aantal koperen balletjes, geregen aan een flexibel frame met 'memory shape'. De balletjes hebben een koperoppervlak van 300 mm². Zodra het frame uit de inbrenghuls komt, krult het zich in de baarmoeder op tot een bolle vorm. Door deze vorm vindt de Ballerine constant haar ideale positie in de baarmoeder. Omdat de inbrenghuls van de Ballerine dunner is dan die van andere spiraaltjes, kan dit het plaatsen vergemakkelijken.

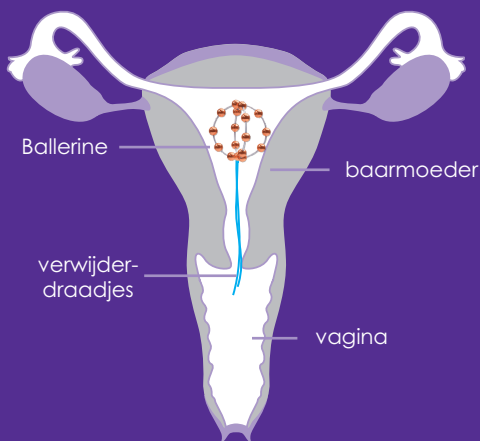

Direct na plaatsing geven de koperen balletjes van de Ballerine geleidelijk een beetje koper af. Dit zorgt ervoor dat:

- spermacellen verlamd worden,
- bevruchting van een eicel voorkomen wordt,
- het innestelen van een eicel in de baarmoeder voorkomen wordt.

Ballerine werkt op een vergelijkbare wijze als andere koperspiralen en zorgt voor betrouwbare anticonceptie gedurende 5 jaar.

BIJWERKINGEN

In de eerste drie maanden na plaatsing van de Ballerine kunnen vrouwen last krijgen van bijwerkingen. De meeste vrouwen hebben weinig tot geen last van het spiraaltje, maar bij anderen is er wel sprake van bijwerkingen, zoals:

- hevige, langdurige en/of onregelmatige menstruatie,
- (soms hevige) buikkrampen,
- tussentijds bloedverlies.

Na deze drie maanden is je lichaam gewend aan het spiraaltje en herstelt de natuurlijke cyclus zich.

Je mag de Ballerine niet gebruiken bij*:

- onverklaarbaar vaginaal bloedverlies,
- een actieve ontsteking in het kleine bekken,
- een afwijking van de baarmoeder,
- de ziekte van Wilson,
- een koperallergie.

De Ballerine is minder geschikt voor vrouwen die van nature hevig menstrueren en hier last van ondervinden.

* Deze folder is een aanvulling op de patiëntenbijsluiter.
Lees altijd eerst de bijsluiter voordat je de Ballerine laat plaatsen.



VERGOEDING & KOSTEN

Vrouwen tot 25 jaar ontvangen een extra tegemoetkoming voor anticonceptie van € 3,- per maand, oftewel € 36,- per jaar. Dit betekent dat de Ballerine gratis is voor vrouwen tot 25 jaar. De tegemoetkoming wordt automatisch verrekend als je het voorgeschreven spiraaltje ophaalt bij de apotheek. Vrouwen van 25 jaar of ouder ontvangen bij sommige ziekenfondsen een eigen, niet wettelijk bepaalde tegemoetkoming. Dit verschilt per ziekenfonds en kan aan bepaalde voorwaarden onderhevig zijn.

Belangrijk: informeer bij je ziekenfonds hoeveel tegemoetkoming je krijgt bij plaatsing door de huisarts of door de gynaecoloog.

Ballerine is verkrijgbaar bij de apotheek en kan ook online besteld worden via www.ballerine.eu. De aanschafprijs is € 139. Een spiraaltje dat via de website wordt besteld, wordt niet door de verzekering vergoed.





Titus Health Care BV
info@titushealthcare.nl
www.titushealthcare.nl
+31 (0)20 722 0825

WWW.BALLERINE.EU

3D

Innovatief design
Bolvormig 3D-IUD



Hormoonvrij

**3,2
mm**

Dunne inbrenghuls: 3,2 mm

99%

Betrouwbaarheid: 99%

**5
jaar**

Verblijfsduur van 5 jaar